

iPad、iPhone、iPod iOS7 以降

スイッチコントロール用 スイッチボックス

接続出来るスイッチは1つ。
確認用スイッチ装着。

有線接続用




apple ストア

- 1 -

*このスイッチボックスを
iPad、iPhone、iPod touch に
接続するためには Apple 純正の
Lightning-USB 3 カメラアダプタ
が別途、必要です。

設定の手順
iPad、iPhone、iPod に Apple の Lightning -
USB 3 カメラアダプタをつなぎます。アダプ
ターの USB ポートにスイッチボックスをつな
ぎます。スイッチボックスに使用するスイ
ッチをつなぎます。
*接続後、10 ~ 15 秒ほどで
スイッチボックスとして認識します。

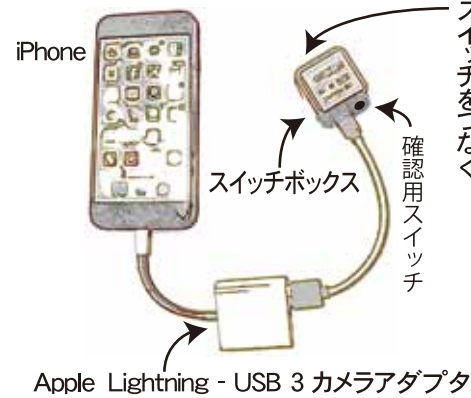

- 2 -

[設定] → [一般] → [アクセシビリティ]
AssistiveTouch オフとタッチ調整オフを確認し
てから、[スイッチコントロール] → [スイッチ]
→ [新しいスイッチを追加] → [外部]
[外部スイッチをアクティベートしてください...]
このメッセージが出たら接続したスイッチを
1回押します。
[新しいスイッチ] 名前をつけます。→ [保存]
→ [項目を選択]
[スイッチコントロール] に戻って
[ハイライトのスタイル 自動]
以上で設定は完了です。
スイッチコントロールをスライドさせて ON にす
るとスキャンが始まります。
*ホームボタンを連続3回押しでショートカット
が使えます。
(iOS11 以前の OS はショートカットの手動設
定が必要です)

- 3 -

Apple のホームページに使い方
の解説があります。

スイッチコントロールを使って
iPhone、iPad、または iPod
touch を操作する。

トーキングエイド for iPad の外部スイッ
チボックスとして使う場合。

有線でスイッチをつないだ状態で、

[設定] → [TA テキスト S] →

[外部スイッチ] → [オートスキャン] または

[1センサステップスキャン]

トーキングエイド for iPad を起動します。



- 4 -



- 5 -